

Link do produktu: <https://bruta.pl/higieniczna-neoprenowa-polmaska-antysmogowa-z-weglem-aktywnym-neo-mix-citymask-p-2451.html>



Higieniczna neoprenowa półmaska antysmogowa z węglem aktywnym NEO MIX CityMask

Cena brutto	149,90 zł
Cena netto	121,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NEO MIX
Producent	CityMask

Opis produktu

Zastosowanie:

Półmaska antysmogowa służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed wdychaniem uciążliwych pyłów.

Półmaska idealnie nadaje się do codziennego użytku w drodze do szkoły, biura, na zakupy.

Nowatorska konstrukcja półmaski i wyposażenie jej w zawór wydechowy zapewniają chłodniejsze powietrze pod czasą podnosząc w znacznym stopniu komfort jej użytkowania w porównaniu z półmaskami bez zaworu.

Zamontowany zawór wydechowy ułatwia wydychanie powietrza.

Półmaski skuteczne są przy pyłach PM10, PM2,5, jak i submikronowych.

Zalety:

Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał.

Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność.

Dzięki umieszczeniu dwóch zaworów na boku półmaski można ją w przerwie wykonywanych czynności złożyć i schować do kieszeni nie uszkadzając jej.

Opakowanie zawiera półmaskę z zamontowanym wkładem filtracyjnym oraz dodatkowy wkład wymienny.

Czas użytkowania:

Czas użytkowania półmaski zależy od wielu czynników tj. budowa ciała, wiek, wzrost, poziom wysiłku fizycznego, wykonywana czynność.

Przyjmuje się że produkt przydatny jest do użytku do momentu gdy opory oddechowe wynikające z zapchania pyłem są zbyt duże i uniemożliwiają swobodne oddychanie.

Maska neoprenowa z wymiennym wkładem filtracyjnym (filtrem) może być użyta wobec następujących zagrożeń:

- smog
- spaliny
- grypa wirusowa
- emisje przemysłowe

Uwaga: Przy pierwszym użyciu maski może być wyczuwalny lekki zapach

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

-
1. Nałożyć maskę na grzbiet nosa i podbródek
 2. Zamocować maskę z tyłu głowy zapięciem na rzep.
 3. Nałożyć elastyczny aluminiowy zacisk na grzbiet nosa. Zacisk można odpowiednio dostosować do kształtu nosa i twarzy; jego konstrukcja umożliwia duży zakres regulacji.
 4. Sprawdzić, czy maska jest prawidłowo założona: przyłożyć dłoń do twarzy i mocno oddychać, obserwując przepływ wydychanego pod ciśnieniem powietrza.
 5. Wyregulować zapięcie na rzep tak, aby maska szczelnie i mocno przylegała.

WYMIANA FILTRA

WYMIANA FILTRA:

1. Otworzyć maskę. Po otwarciu - widoczne będą wewnętrzne części zaworów wydechowych.
2. Otworzyć każdy zawór, zgodnie z zamieszczoną na nim instrukcją (OPEN). Obrót zaworu spowoduje odłączenie go od części zewnętrznej.
3. Wymontować dwa zawory, wyjąć filtr.
4. Włożyć nowy filtr. Zamknąć każdy zawór, zgodnie z zamieszczoną na nim instrukcją (CLOSE). Obrót zaworu zakończy procedurę wymiany.